

---

## Blutgas-Entnahmeverrichtungen A-K-FIX (arteriell)

---

Blutgasentnahmesystem Typ A-K-FIX.

Zur arteriellen Blutentnahme für die pH/Blutgas-, Elektrolyt-, Oximetri- und Metabolit-Analyse.

Durch den AUTOSTOP wird der Blutfluss automatisch gestoppt.

Gleichmäßige Beschichtung mit balanciertem Heparin.

Gefertigt aus bruchsicherem und gasdichtem Material.

Die Entnahmeverrichtung ist einzeln, steril verpackt.



### Gebrauchsanweisung:

- punktieren
- Kapillarrohr füllt sich mit Blut
- Punktion beenden
- Kanüle entfernen
- Konuskappe aufsetzen
- Bei Einsatz am Analysengerät : hinteren Verschlussstopfen eventuell leicht lösen

Alternativprodukt zum Roche (AVL) Microsampler.

Der A-K-Fix wird häufig im Kreißsaal oder auf Kinder(Intensiv)stationen eingesetzt.

Bitte immer die von uns empfohlene Einmalkanüle Ø 0,6 x 26 mm 23Gx1“ verwenden.

**Die Kanülen (Artikel 191316) müssen immer separat mitbestellt werden!**

---

## Blutgas-Kapillaren, steril (Kapillarset)

---

Zur arteriellen Blutentnahme für die pH/Blutgas-, Elektrolyt-, Oximetri- und Metabolit-Analyse.

Bei den Kapillarsets handelt es sich um eine einzeln, steril verpackte Blutgaskapillare.

Die Eigenschaften sind die gleichen wie oben aufgeführt. In der Sterilverpackung sind zwei Verschlusskappen enthalten.

Das Kapillarset wird meistens im Kreißsaal oder OP-Bereich eingesetzt.

---

## Blutgas-Entnahmeverrichtungen (Spritzen)

---

Blutgasentnahmesystem zur arteriellen Blutentnahme für die pH/Blutgas-, Elektrolyt-, Oximetri- und Metabolit-Analyse.



*erhältlich als 1- oder 2mL Spritze mit und ohne Autostopkappe*

Gleichmäßige Beschichtung mit flüssigem balanciertem Heparin.

Diese Beschichtungsart hat den Vorteil, dass sich die Blutprobe schneller mit dem Gerinnungshemmer vermischt und so die Gefahr einer Blutaggregation mindert.

Die Entnahmeverrichtung ist einzeln, steril verpackt.

Alternativprodukt zur Radiometer Pico-Entnahme.

Das Produkt wird häufig auf **Intensivstationen** und im **Dialysebereich** eingesetzt.

Dieses Dokument ist zum internen Gebrauch und zur Schulung von Verkaufsmitarbeitern bestimmt.